

INSTRUKCJA OTWARCIA PUDEŁKA I BLISTRY PRODUKTY ROOTT STERYLNE



Przed użyciem upewnij się, że opakowanie nie jest uszkodzone. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Czerwony kolor naklejki promieniowania gamma wskazuje, że opakowanie przeszło proces sterylizacji. Ta sama naklejka zabezpiecza opakowanie przed otwarciem od dołu.



GAMMA RADIATION
STERILIZATION INDICATOR
RED IS γ EXPOSED

1 Weź pudełko do ręki



2 Otwórz pudełko: naciśnij i pociągnij, aby otworzyć



③ Wyjmij blister





④ Weź blister do ręki





⑤ Otwórz blister



⑥ Blister jest otwarty, wyjmij implant.

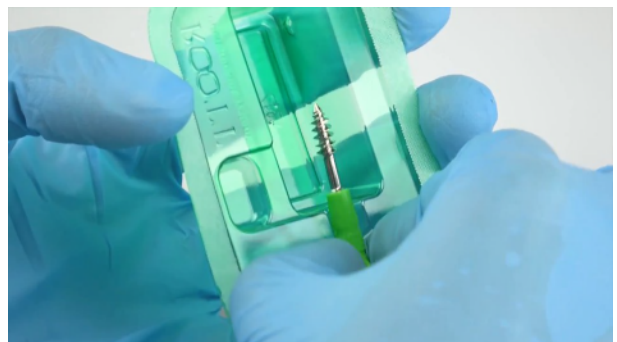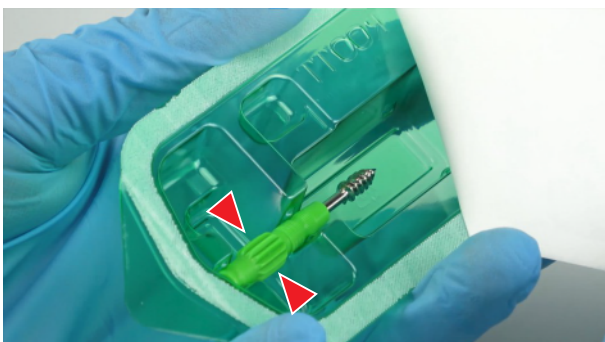

Przytrzymaj palcami zieloną część, jak pokazano.

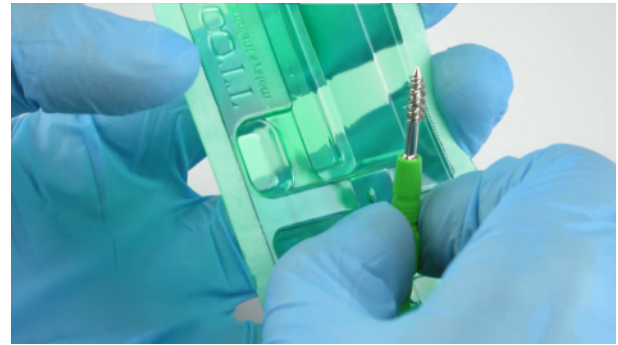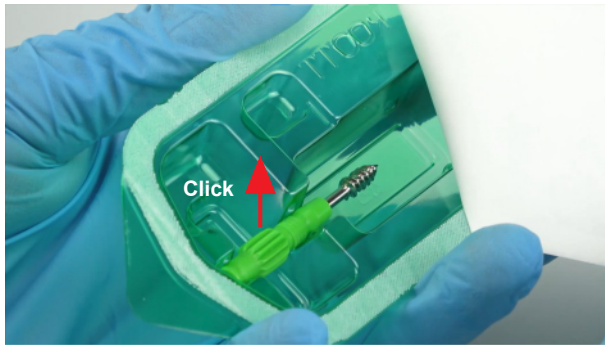


Podciągnij ostrożnie trzymając zieloną część.



- 7 Natychmiast wprowadzić implant zgodnie z ruchem wskazówek zegara do przygotowanego otworu, trzymając tylko za zieloną część.
Przygotuj otwór przed otwarciem pudełka.



⑧ Zdejmij zielony uchwyt obok siebie w zwolnionym tempie i podnieś.

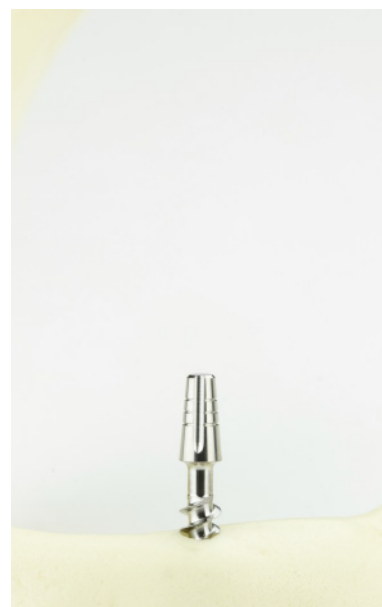

Dalsze kroki można znaleźć w *“Placement protocol”*.